

Användning

RHEVA sårskydd finns i två storlekar: **Small** 5×7 cm eller **Large** 7×10 cm. Välj den som passar sårets storlek bäst.

För att RHEVAN ska sitta så bra som möjligt är det viktigt att området är rengjort ordentligt, i normala fall rekommenderar vi koksaltlösning.

Raka gärna området om du har möjlighet, då fäster RHEVAN ännu bättre.



1. Rengör sår och fästyta noggrant. Se till att inga pälsrester finns i såret.

Vi rekommenderar koksaltlösning i normala fall.



2. Torka fästyten nog.

Området kan med fördel rakas om det är möjligt, det ger en bättre kontaktyta.



3. Dra av den vita plastfilmen.

Försök så gott det går att inte vidröra klisterytan med dina fingrar.



4. Fäst RHEVAN omgående och tryck runt fästyten.

Håll gärna trycket någon minut, detta värmer klisterytan och gör att plåstret fäster bättre.

Om det finns päslglans eller flugspray i pälsen kan det vara lite svårare att få RHEVAN att fästa. Var noga med att få bort päslglans/flugspray, exv med en fettlösande rengöringsservett.

Nu är såret skyddat mot insekter och andra infektionsrisker.

På vissa platser på hästen, som hasor, ben och hals (där det är mycket rörelse) kan det ibland bli nödvändigt att stödja RHEVAN med ett Extrafäste (Snögg). Du kan köpa Extrafäste med utstansat hål för Large eller Small av oss.

